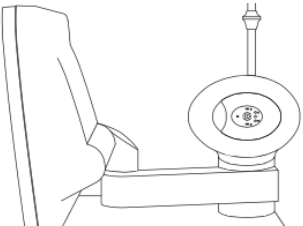
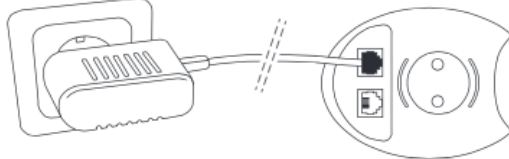
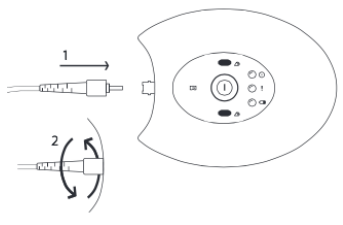
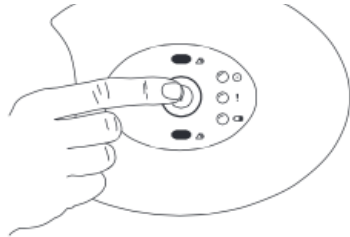
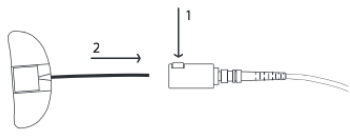
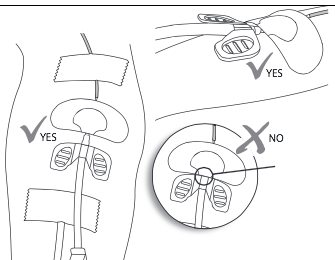
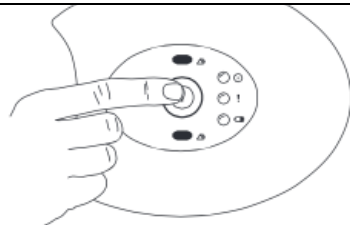


Inbetriebnahme		
1		Alarmeinheit am Infusionsständer anbringen
2		Netzteil an der Rückseite der Alarmeinheit anschließen und das Netzteil in eine Steckdose stecken
3		<p>Schutzhülle vom Alarmsystem und der Glasfaser-Verlängerung entfernen.</p> <p>Glasfaser-Verlängerung mit der Alarmeinheit verbinden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung und "Spitze" ausrichten • Reindrücken und in Uhrzeigersinn drehen
Normale Bedienung		
4		<p>Alarmeinheit anschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal drücken: alle Lichter leuchten und ein Signalton kommt (=System check OK) • Zweite Mal drücken: Grünes Licht blinkt und ein wiederholendes Signalton ist zu hören (=bereit für Sensorpflaster)
5		<p>Arretierknopf der Glasfaser-Verlängerung drücken und das Ende des Sensorpflasters einführen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis man einen Widerstand spürt • Grünes Licht leuchtet jetzt dauerhaft und das Signal hört auf (=Alarmeinheit ist bereit zur Applikation)
6		Sensorpflaster auf die Punktionsstelle kleben und gemäß Richtlinien sichern
Nach Behandlung oder bei Alarmsignal/Warnleuchte		
7		Ein-/Aus-Taste für mindestens 1-3 Sekunden drücken