








Normalbetrieb	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Redsense Bloodline Clamp von der Klemmenhalterung und Überprüfen Sie ob der Abklemm-Mechanismus nicht in die Führung hineinragt • Ziehen Sie das USB-Kabel sowohl aus dem Bloodline Clamp als auch aus dem Dongle heraus und platzieren Sie es neben oder über/hinter der Alarmeinheit • Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 bis 3 Sekunden, um die Bloodline Clamp zu aktivieren (Anzeigen leuchten=> Selbsttest OK)
	<ul style="list-style-type: none"> • Bringen Sie die Bloodline Clamp am venösen Blutschlauch in der Nähe des Dialysegeräts an und stellen Sie sicher, dass der Blutschlauch vollständig unter den drei Fixierungsklemmen eingeführt ist • Grüne Akkuanzeige => bereit für die Behandlung • Bereiten Sie die Alarmeinheit gemäß der üblichen Vorgehensweise vor
Nach der Behandlung	
	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 bis 3 Sekunden, um die Bloodline Clamp auszuschalten • Bloodline Clamp und Dongle reinigen mit Desinfektionsmittel/Alkohol und einem feuchten Tuch
	<ul style="list-style-type: none"> • Platzieren Sie die Bloodline Clamp an dem Klemmenhalter und stecken Sie das USB-Kabel in den Dongle und in die Bloodline Clamp, um die Bloodline Clamp aufzuladen
Ersteinrichtung und Kopplung	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Redsense Dongle auf der Rückseite der Alarmeinheit an und Schließen Sie das Redsense Ladegerät an der Unterseite der Dongle an
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Bloodline Clamp und die Redsense Alarmeinheit ausgeschaltet sind • Ziehen Sie das Netzkabel aus der Strombuchse des Dongles und schließen Sie es wieder an. Dadurch wird der Dongle zurückgesetzt
	<ul style="list-style-type: none"> • Koppeln Sie den Dongle und die Klemme, indem Sie das USB-Kabel miteinander verbinden. • Die Geräte verbinden sich, wenn beide kommunikationsanzeige beginnen blau/gelb zu blinken. • So sollte auch die Bloodline Clamp zwischen den Behandlungen aufgeladen werden.